



# Отривин

## Бэби Комфорт




Для очищения  
носа вашего  
малыша



05ET216-RU 000020

Аспиратор  
назальный

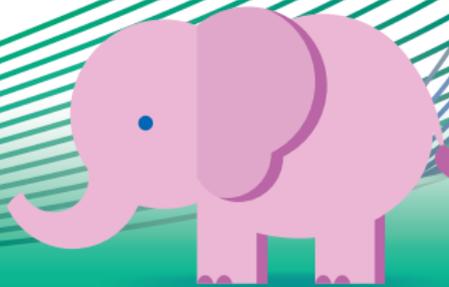

с 2 сменными  
насадками

## Аспиратор назальный Отривин Бэби Комфорт


Медицинское изделие, рег. удостоверение № ФСЗ 2008/01133 от 05.05.2022.

Назначение: Аспиратор назальный Отривин Бэби Комфорт используют у детей (новорожденные, младенцы и младшего возраста) для мягкого удаления слизистых выделений из носа. Аспиратор прост и гигиеничен в применении.

С его помощью можно облегчить носовое дыхание малыша, чтобы он вновь почувствовал себя комфортно. Удаление слизистых выделений способствует предотвращению дальнейших осложнений: ушные инфекции (отит), инфекции пазух (синусит) или кашель.

Для облегчения процедуры перед использованием назального аспиратора Отривин Бэби Комфорт рекомендуется промыть нос солевым раствором, например, каплями Отривин Бэби.

### Способ применения

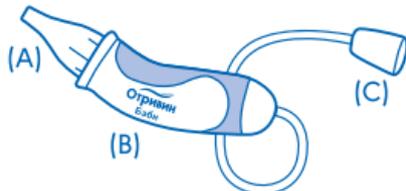

1. Присоедините сменную насадку (А) к центральной части корпуса (В) аспиратора.
2. Возьмите мундштук (С) в рот (для родителей и лиц, ухаживающих за ребенком) и вставьте наконечник (А) в один из носовых ходов ребенка.
3. Осторожно втягивайте воздух ртом при помощи равномерных вдохов через мундштук (С).
4. Если насадка заполняется выделениями в промежутке между вдохами, удалите секрет из насадки в салфетку, продувая мундштук, или замените насадку.
5. Повторите процедуру для другого носового хода.
6. Отсоедините и выбросьте использованную насадку (А).

В целях соблюдения гигиены и для исключения повторного инфицирования насадки следует использовать лишь однократно.

Мягкие одноразовые сменные насадки для аспиратора Отривин Бэби Комфорт продаются отдельно.

Аспиратор назальный Отривин Бэби Комфорт с двумя сменными насадками предназначен для устранения выделений из носа, беспокоящих Вашего малыша при насморке. К аспиратору прилагаются 2 мягкие одноразовые сменные насадки. Перед использованием следует внимательно ознакомиться с информацией на упаковке.

Не следует использовать аспиратор при наличии аллергии на материалы, из которых изготовлены компоненты изделия.

### Состав:

аспиратор – силиконовая трубка, полипропилен; насадки – поливинилхлорид, меламиновая пена.

Не следует использовать аспиратор, если он испорчен или поврежден.

Хранить в недоступном для детей месте в оригинальной упаковке. Хранить при температуре от 0 °С и до 30 °С.

Срок годности 3 года.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Производитель – ГСК Консьюмер Хелскер САРЛ, Рю де Летраз, 1197 Пранжен, Швейцария.

Место производства – «Стилпластик – 62 Чемин дес Плантес – 38160 СЕН-МАРЕСЕЛЛЕН ФРАНЦИЯ

**Организация, принимающая претензии на территории Российской Федерации:**

АО "ГлаксоСмитКляйн Хелскер",  
Россия, 123112, Москва, Пресненская набережная, д.10, помещение III,  
комната 9, эт. 6.

Тел. 8 (495) 777-98-50 факс 8 (495) 777-98-51

Телефон бесплатной "Горячей линии"

8 800 333 46 94

E-mail: rus.info@gsk.com

05ET217-RU 000020



4



602233 007250